

		Hygieneplan	
Rev. 1.0	Seite 1 von 1	APARENT® AKTIV	

WAS

Arm-Parese-Entlastungs-Aktiv-Schiene „APARENT® - AKTIV“ (Klinikversion)

WER

Hygiene-Fachkräfte oder eingewiesene Personen

WANN

REINIGUNG: Bei Bedarf (Reparatur / Pflege)

REINIGUNG + DESINFEKTION: Vor der Weitergabe an andere Anwender und bei Bedarf!

Beschädigte Schienen, Bezüge oder Komponenten müssen ersetzt werden.

WOMIT

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen!

Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in die Schiene.

Behandlung nur äußerlich für den Bezug.

Beseitigung von sichtbaren Verschmutzungen mit feuchtem Schwammtuch und

ggf. etwas Spülmittel.

Keine scheuernden Mittel oder Hilfsmittel verwenden!

Desinfektion der Oberflächen mit **nicht-alkoholbasierten** Desinfektionspräparat

bspw. „mikrozyd® sensitive liquid“ als Sprühdesinfektion oder Schaum der

Schülke & Mayr GmbH

Präparat-Anweisungen beachten!

WIE

Demontage der APARENT Aktiv Schiene vom Rollstuhl.

Behandlung nur äußerlich für den Bezug.

Zur REINIGUNG werden die Oberflächen mit einem feuchten Schwammtuch und ggf.

fettlösendem Spülmittel gereinigt. Im Anschluss werden die Oberflächen mit einem

Baumwoll- oder Einmaltuch getrocknet.

Zur DESINFEKTION das „mikrozyd® sensitive liquid“ unverdünnt auf die Oberflächen

bringen und **1 Minute** einwirken lassen (bei Verdacht auf Noro-Virus-Kontamination

30 Min). Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatemengen mit

ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

FRAGEN?

ALBO Healthcare GmbH - Korporationsweg 14 - CH-8832 Wilen bei Wollerau SZ